



CARE PUMP

## EXPERT 8


Advanced line

Nombre de chambres	8
Pression Max. [mmHg]	220
Nombre de préprogrammes thérapeutiques préprogrammes thérapeutiques de l'organisation médicale	13
Fonctionnalités pour les personnes aveugles	assistant vocal + clavier spécial
Fonction "Smart Gradient"	mmHg, %, pression finale
Temps de maintien [s]	1-50
Temps d'intervalle [s]	1-50
Régulation précise de la pression et du temps	par pas de 1, 5 ou 10
Réglage de la pression individuelle dans chaque chambre	inclus
Nombre de canaux indépendants	1
Ajustement de la vitesse du traitement	1-5
Manchettes	système de chevauchement
Programmes propres à l'utilisateur	inclus
Liste des programmes "favoris"	inclus
Ecran	7" TN Icd color touch screen
Poids [kg]	3,6
Dimensions [mm]	300x260x160
Alimentation	100÷240 V, 50÷60 Hz
Puissance	40-70 W
Garrantie	2 ans

# Accessoires




## Inclus:

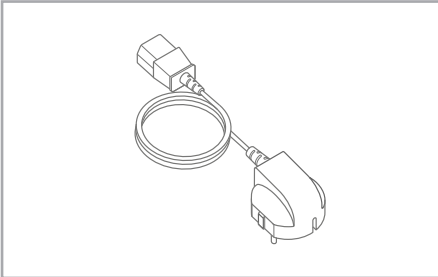


power supply

## Options:

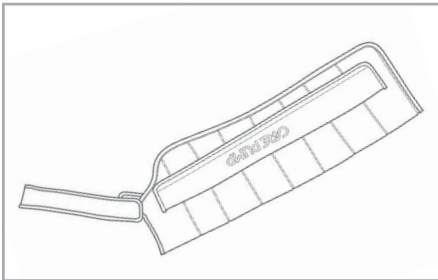


Brassard à 8 chambres

CPARM8T

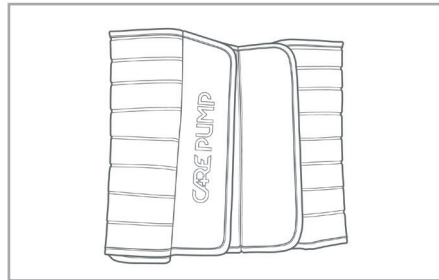


Manchette de taille à 8 chambres

CPWAIST8T

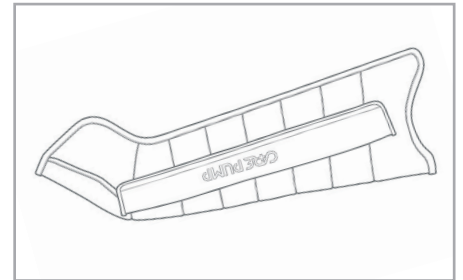

Manchette de jambe gauche à 8 chambres

CPLEG8TL

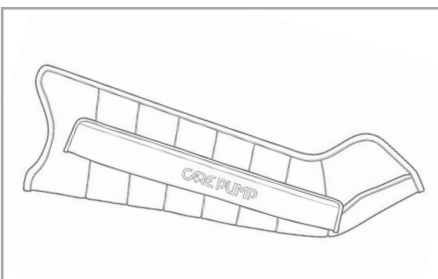


Manchette de jambe droite à 8 chambres

CPLEG8TR




Pantalon court à 8 chambres

CPSHORTPANTS8T

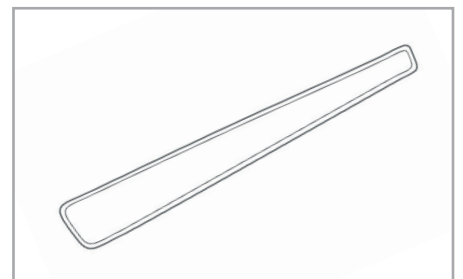


Extension zipper

CPLEGEXT8

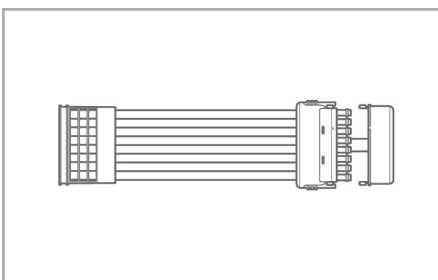


Séparateur double

CPDOUBLECONNECTOR

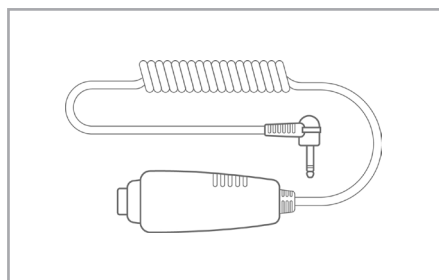


Bouton de sécurité du patient

SAFETY BUTTON

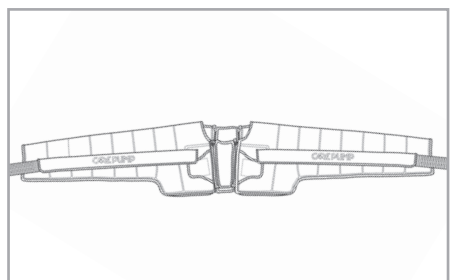


Manchette double à 8 chambres pour les bras, les épaules et la poitrine

CPDOUBLEARM8T

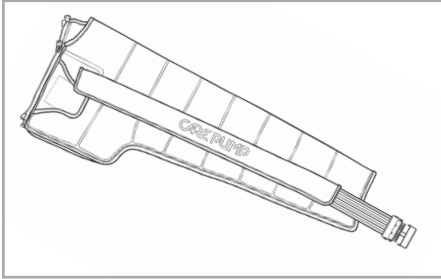


Brassard à 8 chambres pour le bras gauche, l'épaule et la poitrine

CPARMSB8TL

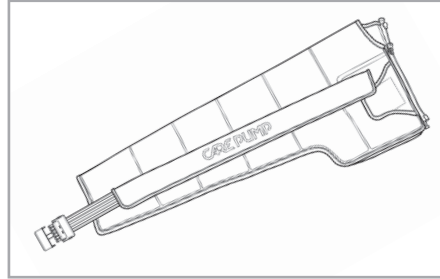


Brassard à 8 chambres pour le bras droit, l'épaule et la poitrine

CPARMSB8TR

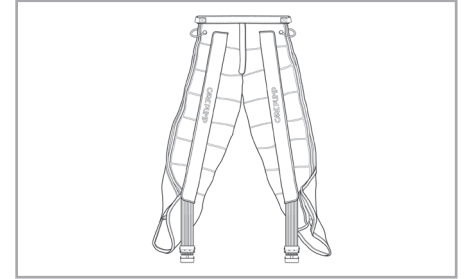


Pantalon complet à 8 chambres

CPLEG8TL

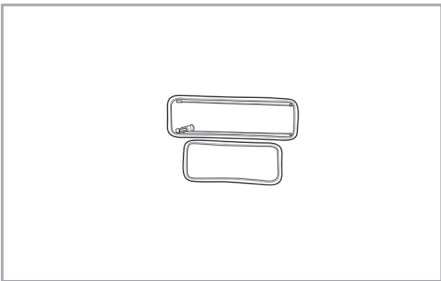


2 x Fermetures à glissière d'extension pour manchette double à 8 chambres pour les bras, les épaules et la poitrine

CPDOUBLEARMEXT8

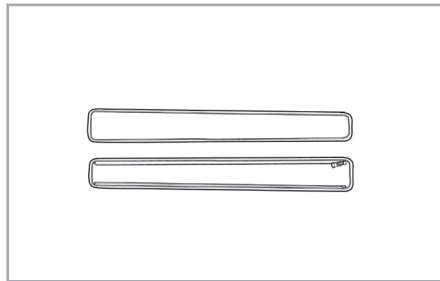


2 x Fermetures à glissière d'extension pour pantalon court à 8 chambres

CPSHORTPANTSEXT8

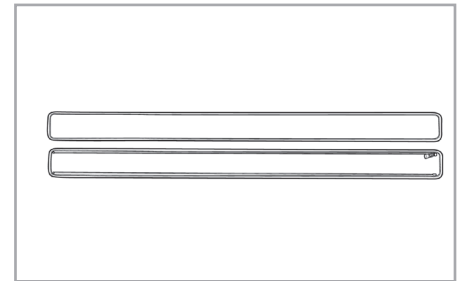

2 x Fermetures à glissière d'extension pour les pantalons

CPLONGPANTSEXT8

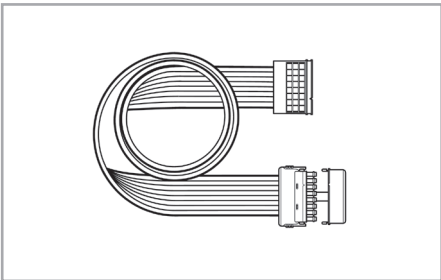

Séparateur double (long - 150 cm) pour les appareils à 8 chambres

CPDOUBLECONNECTOR8L

# Pré-programmes thérapeutiques

## de l'organisation médicale



lymphoedema I

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

<b>Gradient</b>	1 mmHg
<b>Time</b>	50 min.
<b>Hold</b>	3 s
<b>Interval</b>	3 s

lymphoedema II

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

<b>Gradient</b>	1 mmHg
<b>Time</b>	50 min.
<b>Hold</b>	3 s
<b>Interval</b>	3 s

lymphoedema III

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

<b>Gradient</b>	1 mmHg
<b>Time</b>	50 min.
<b>Hold</b>	3 s
<b>Interval</b>	0 s

lymphoedema IV

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

<b>Gradient</b>	1 mmHg
<b>Time</b>	50 min.
<b>Hold</b>	3 s
<b>Interval</b>	0 s

venous oedema I

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

<b>Gradient</b>	3 mmHg
<b>Time</b>	45 min.
<b>Hold</b>	2 s
<b>Interval</b>	3 s

venous oedema II

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

<b>Gradient</b>	3 mmHg
<b>Time</b>	45 min.
<b>Hold</b>	2 s
<b>Interval</b>	2 s

lipodema I

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


<b>Gradient</b>	2 mmHg
<b>Time</b>	60 min.
<b>Hold</b>	3 s
<b>Interval</b>	3 s

lipodema II

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


<b>Gradient</b>	2 mmHg
<b>Time</b>	60 min.
<b>Hold</b>	3 s
<b>Interval</b>	3 s

post-injury therapy

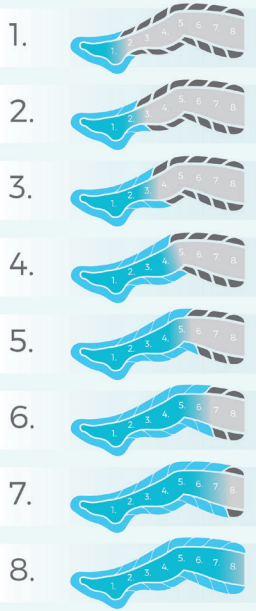


<b>Gradient</b>	4 mmHg
<b>Time</b>	30 min.
<b>Hold</b>	2 s
<b>Interval</b>	2 s

prevention, relaxation

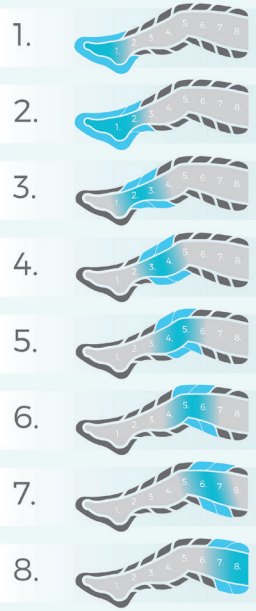


<b>Gradient</b>	0 mmHg
<b>Time</b>	60 min.
<b>Hold</b>	2 s
<b>Interval</b>	2 s

cellulite **advanced**

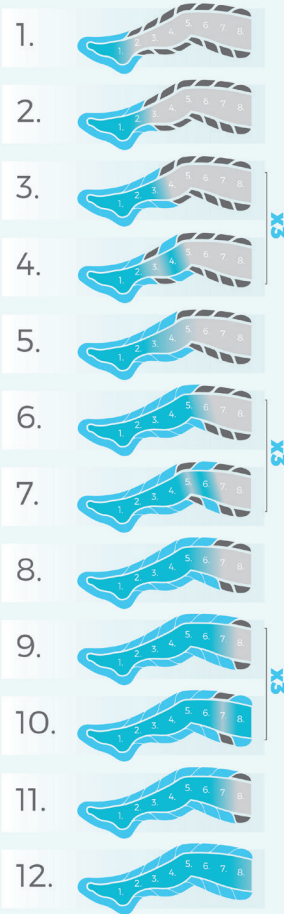


<b>Gradient</b>	1 mmHg
<b>Time</b>	60 min.
<b>Hold</b>	1 s
<b>Interval</b>	2 s

regeneration

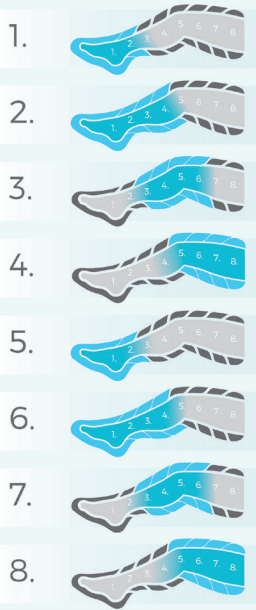

<b>Gradient</b>	4 mmHg
<b>Time</b>	45 min.
<b>Hold</b>	2 s
<b>Interval</b>	2 s

all-chamber massage

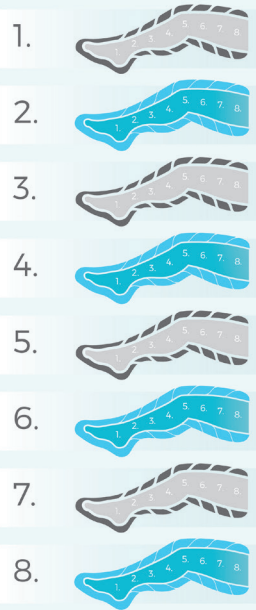

<b>Gradient</b>	0 mmHg
<b>Time</b>	30 min.
<b>Hold</b>	2 s
<b>Interval</b>	3 s